

3. Kontrola jakości

Przeprowadzanie regularnej kontroli jakości pozwala na utrzymanie wysokiej jakości i stabilności uzyskiwanych wyników. Patrz rozdz. 4.

Nie wszystkie rodzaje produkowanych krwi kontrolnych mogą zostać użyte do kontroli K-4500. Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.

Następujące tryby analizy jakości są dostępne w aparacie K-4500:

TABELA 2-3 Tryby kontroli jakości.

Tryb	X średnie	Levy-Jennings	Konieczny warunek
Praca ręczna	Dostępne	Dostępne	Żadny
Praca ręczna - krew kapilarna	Niedostępne	Niedostępne	Niedostępny dla kontroli jakości
Praca automatyczna	Niedostępne	Dostępne	Podajnik oraz czytnik kodu paskowego
Praca w systemie zamkniętym	Dostępne	Dostępne	Podajnik
Praca z przystawką w systemie zamkniętym	Dostępne	Dostępne	Przystawka do pobierania krwi w systemie zamkniętym